

## Macacão de Proteção Especial Descarpack CA 45.092



### Características Técnicas do EPI

- Macacão confeccionado em polipropileno e uma camada especial de polietileno laminado;
- Não estéril;
- Equipamento de Proteção Individual – EPI – tipo macacão de segurança, com proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra riscos de origem química;
- Punho em malha;
- Resistência à penetração de aerossóis líquidos e partículas bacterianas;
- Proteção da cabeça, tronco, membros superiores e inferiores;
- Hermeticamente fechado;
- Fornece um alto nível de gerenciamento de umidade e respirabilidade;
- Possui capuz, aba sobre o zíper e elásticos nos punhos, tornozelos, capuz e cintura;
- Altamente resistente;
- Macacão tipo 6 - vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007;
- Notificação Anvisa: 10330660324;
- CA: 45.092.

### Matéria-Prima da Fabricação

- Macacão de Proteção Especial Descarpack: Polipropileno e uma camada especial de filme de polietileno laminado;
- Zíper: Nylon;

### Tamanhos Disponíveis

- G;
- XG.

### Indicação de Proteção

O Macacão de Proteção Especial Descarpack protege o usuário contra produtos químicos líquidos ou sólidos que possam ser agressivos a pele, oferecendo resistência à penetração de aerossóis líquidos e partículas bacterianas

### Instruções de Uso

#### Pré-uso

- Recomenda-se a utilização de uniformes e/ou roupas de algodão por baixo da vestimenta;
- Verifique atentamente a data de validade do produto;
- Verifique a integridade da embalagem;
- Ao retirar o Macacão de Proteção da embalagem, abra o mesmo e verifique qualquer tipo de avaria improvável

que possa ter no produto, tais como partes descosturadas ou rasgadas;

- Efetue o fechamento e abertura do zíper antes da utilização do produto, para evitar travamentos e rompimentos durante a utilização;
- Em caso de avaria, não utilizar o produto.

### **Vestindo o Macacão de Proteção Especial Descarpack**

- Abra completamente o zíper frontal;
- Vista as pernas do macacão e realize o ajuste do elástico nos tornozelos;
- Vista os braços do macacão e realize o ajuste do elástico nos punhos;
- Puxe o capuz;
- Feche completamente o zíper frontal;
- Faça a proteção do zíper fechando a aba com fita adesiva existente na parte frontal do macacão.

### **Retirando o Macacão de Proteção Especial Descarpack**

- Retire o capuz;
- Abra completamente a aba de fita adesiva localizada na parte frontal do macacão;
- Abra completamente o zíper frontal;
- Retire primeiramente os ombros do macacão;
- Em seguida, retire cuidadosamente os braços e as pernas do macacão de proteção;
- Evite o contato com as partes contaminadas do Macacão de Proteção Especial Descarpack;
- Descartar o produto em local apropriado.

### **Instruções de Armazenamento e Transporte**

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4°C a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras e dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

### **Condições de Manipulação, Limpeza e Higienização**

Não são informados métodos de limpeza e desinfecção pois o produto é de recomendação de uso único.

### **Instruções de Manutenção**

Não são informados métodos de manutenção pois o produto é de recomendação de uso único e deve ser descartado após a utilização.

### **Restrições e Limitações do EPI**

- Este produto não é indicado para uso contra agrotóxicos.

### **Prazo de Validade**

Três (03) anos após data de esterilização

### **Proteção em Eletricidade**

Não há – Macacão de Proteção Especial sem isolamento elétrico.

### **Substâncias Alergênicas ou Prejudiciais à Saúde**

Macacão de Proteção Especial é confeccionado em polipropileno e polietileno, podendo causar reações alérgicas à usuários sensíveis. Neste caso suspender o uso imediatamente.

### **Incompatibilidades**

Não há.

### **Possibilidade Alterações no EPI**

O Macacão de Proteção Especial perderá suas características de proteção caso as condições de uso estabelecidas neste manual de instruções não forem respeitadas.

### **Local das Marcações Exigidas**

Na etiqueta.

### **Recomendações**

- Seguir corretamente as instruções de uso;
- Utilizar o Macacão de Proteção Especial no tamanho correto;
- Não utilizar caso a embalagem esteja aberta ou violada;
- Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade;
- Produto não estéril;
- Destruir após o uso.

### **Advertências e Precauções**

- Inspecionar a existência de defeitos ou imperfeição antes da utilização;
- Este produto não oferece proteção contra fagulhas ou chamas, e não deve ser utilizado em torno de calor, chama aberta, faíscas ou em ambientes potencialmente inflamáveis ou explosivos;
- O Macacão de Proteção Especial oferece proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores;
- Caso rasque, o Macacão de Proteção Especial deve ser descartado e substituído imediatamente;
- Utilizar Macacão de Proteção Especial do tamanho correto;
- Proteger este produto do calor, luz e umidade;
- Produto não estéril;
- Fabricante recomenda uso único;
- O Macacão de Proteção Especial Descarpack possui uma etiqueta de identificação interna na gola do produto. Esta etiqueta indica o tipo de proteção do produto, conforme a ISO 16602, além de outras informações importantes ao usuário.

### **Ensaio dos requisitos de desempenho:**

Verificação dos requisitos de desempenho estabelecido para o material da vestimenta do Tipo 6 conforme a ISO 16602:2007 + A1:2012.

Ensaio Especificação		Nível de desempenho obtido	Classificação*
Penetração a líquidos	Ácido sulfúrico 30%	Nível 3	 ISO 16.602 - Tipo 6
	Hidróxido de sódio 10%	Nível 3	
	Butanol	Nível 3	
	o-Xileno	Nível 2	
Repelência a líquidos	Ácido sulfúrico 30%	Nível 3	
	Hidróxido de sódio 10%	Nível 3	
	Butanol	Nível 2	
	o-Xileno	Nível 1	
Resistência à tração		Nível 1	
Resistência ao rasgamento trapezoidal		Nível 2	
Resistência à perfuração		Nível 1	
Força de estouro		Nível 2	
Resistência à abrasão		Nível 1	
Resistência à flexão		Nível 6	

#### Fabricante Responsável

Shanghai JPS Medical Co.,Ltd  
Office 1805, Bld 15, Lane 201, Jinxiang Rd., Pudong,  
Xangai – China

#### Unidade Importadora I

Descarpac Descartáveis do Brasil Ltda  
Rua Doutor Leoberto Leal, 1150 – Centro - Ilhota – SC  
CEP 88320-000  
CNPJ: 01.057.428/0002-14 / I.E. 255. 460.058

#### Unidade Importadora II

Descarpac Descartáveis do Brasil Ltda  
Av. Coronel Cyrillo Neves, 1239 – G-8 – Santo Agostinho  
Manaus – AM - CEP: 69036-605  
CNPJ: 01.057.428/0003-03

#### Matriz

Descarpac Descartáveis do Brasil Ltda.  
Av. Queiróz Filho, 1700, torre A, sala 305/306  
Vila Hamburguesa – São Paulo – SP - CEP: 05319-000  
CNPJ: 01.057.428/0001



55 (11) 3649.5555  
Descarpac.com.br



**DESCARPAC**  
Efficiency in Disposables